

歯科材料（9） 歯科用研削材料
一般医療機器 歯面研磨材 70904000
クリニーク

【禁忌・禁止】

本品の成分に対し、過敏症の既往症のある患者には、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

ジャー型の容器に入ったペーストで、種類はフッ素入りとフッ素無し
の2種類ある。内容量はそれぞれ100g。

原材料

プロピレングリコール、パラフィン、スルホコハク酸、オキシトリウム液、ポリキセレン・メチル
シロキサン、二酸化ケイ素、色料、フッ化カルシウム（フッ素入りのみ）、その他

【使用目的又は効果】

歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。歯科予防
治療用ブラシ、歯磨カップ等を用いて歯面を研磨する。

【使用方法等】

- ペーストをスパチュラ等を用いて少量取り出す。
- 歯科予防治療用ブラシまたは歯磨カップ等に適量を付着させ、1回分のペーストで2～3歯を目安に清掃、研磨する。



回転数：3,000回転/分以下

RDA(Relative Dentin Abrasion 相対的象牙質研磨効率)：27

REA(Relative Enamel Abrasion 相対的珐瑯質研磨効率)：3.4

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 熱の発生やペーストの飛散を避けるために、低速度（3,000回転/分以下）で使用すること。
- 歯面に被膜が残った場合は、新たにペーストを取り、処置すること。
- 象牙質が露出している場合は、はじめにエナメル質を、次に象牙質を処置すること。
- 分取したペーストは、容器に戻さないこと。

【保管方法及び有効期間等】**[保管方法]**

高温多湿を避けて保管し、直射日光、デンタルライト等の強い光が
あたる場所に置かないこと。

[有効期間]

- ・36ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
電話番号：072-947-2028
製造業者：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）
国名：スイス（Switzerland）