

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000

プロフィーブラシ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ニッケルに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、患者には使用しないこと。
- 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

本品は、ブラシの形状の異なる 2 種類の製品から構成される。
歯科用ハンドピースに装着し、回転させて歯面を研磨、清掃する。
最大使用回転数：5,000 回転/分

スクリュータイプ スモール

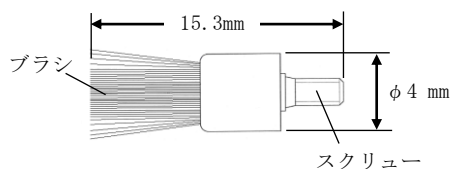

スクリュータイプ スモールポイント

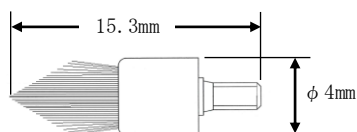

原材料

ブラシ：天然毛（豚）

スクリュー：真鍮（ニッケルメッキ）

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 歯科用ハンドピースに装着する。
2. 歯面のプラークの染め出しを行う。
3. 研磨材を併用し、歯面を清掃、研磨する。通常は使用回転数 2,000 回転/分以下（目視で回転が確認できる速度）で使用する。
4. 研磨材を洗い流すため、水洗を十分に行う。

【使用方法に関する使用上の注意】

- スクリューがハンドピースに確実に固定されていることを確認してから使用すること。
- ハンドピースのネジ山がスクリューに適合しないハンドピースは使用しないこと。
- スクリューを直接ハンドピースに装着する場合は、ハンドピースを作動させずに手で回して装着すること。
- 必ず正回転（時計回り方向）で使用する。
- 使用回転数を超えた使用は、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転数を守る。
- 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 本品が変形あるいは破損し、口腔内を傷つけるおそれがあるため、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。

【使用上の注意】

- 安全のために、保護メガネ等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【有効期間】

- 60 ヶ月 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：カー・ハーヴェ社（KerrHawe SA）
国名：スイス（Switzerland）