

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 31776000
フロントサーフェイスミラー


【禁忌・禁止】

ニッケル及びクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】


本品は、ミラーヘッドとハンドルより構成される。

- ミラーヘッド（コーン ソケット）

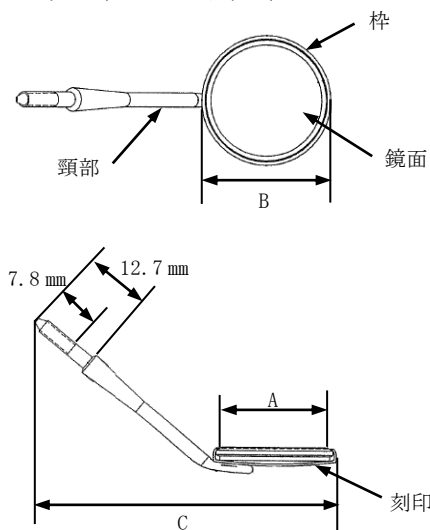

種類	製品番号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	刻印
P 2	15974	17.3	19.8	60.7	2
P 4	15975	20.3	23.1	65.1	4
P 5	15976	23.1	26.5	67.5	5

- ハンドル（5C）：製品番号 00296

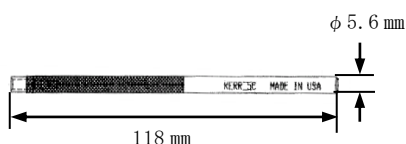

構成部品：

名称	原材料
ミラーヘッド	頸部
	枠
	鏡面
ハンドル	ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

本品を口腔内に挿入し、鏡面に患部が映るように位置及び角度を調節して診査する。

【使用上の注意】

使用前に必ず洗浄・滅菌（保守点検に係わる事項参照）を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前・使用後の点検
 - 破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
 - 使用後は、感染防止のため洗浄、滅菌すること。
- 洗浄
 - 使用後は、速やかにぬるま湯の流水下で、血液や付着物等を取り除く。
 - 使用後すぐに洗浄できない場合は、中性の洗剤に浸けておくこと。
 - 次の A. ～ C. の方法で洗浄する。
 - 浸け置き洗浄
 - 適切な酵素洗浄剤、又は中性の水性洗浄剤に少なくとも 10 分浸す。
 - 洗浄剤が完全に落ちるまで流水ですすぐ。
 - 超音波洗浄で洗浄する。
 - 除染・滅菌洗浄器で洗浄、滅菌を実施する。
- 滅菌

高圧蒸気滅菌を実施する。（134℃、3 分）

【保守・点検に関する注意事項】

- 洗浄、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
- 洗浄、滅菌するときは、ミラーヘッドとハンドルは取り外した状態で行うこと。
- 漂白剤又は腐食性のある薬液は使用しないこと。
- 洗浄器や滅菌器は取扱説明書に従って使用すること。
- 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度には注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
- 鋭利な刃などがある器具と一緒に洗浄、滅菌する場合は、表面が傷つく恐れがあるので接触しないように注意すること。
- 異なる材質の金属製器具と一緒に洗浄、滅菌しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：072-947-2028
製造業者：カー社（Kerr Corporation,）
国名：アメリカ（U. S. A.）