

歯科材料 7 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000
キャスティングワックス

【形状・構造及び原理等】

種類	形状	製品番号
ブルー レギュラー	スティック	00474
ブルー ハード	スティック	00476
グリーン ハード	スティック	00480

原材料：パラフィンワックス、セリシ、ダニマルゴム、カルナウバロウ、その他

【使用目的又は効果】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型を作製するのに用いる。

【使用方法等】

- ワックスを溶解し、模型に盛り上げ、形成する。
- 通法に従い、埋没、鋳造を行う。

【使用上の注意】

本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温となる場所（暖房器具の近く、直射日光のあたる場所など）に放置しないこと。
- ・25℃以下の場所で保管すること。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・火気厳禁の場所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。

[有効期間]

- ・5年間 [自己認証（製造元データ）による]
使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先：03-6866-7272
製造業者：スポファデンタル (SpofaDental a.s.)
国名：チェコ共和国 (Czech Republic)