

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 70903000

## ポーセレン/セラミック ポリッシャー

再使用禁止

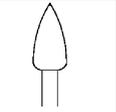
### 【禁忌・禁止】

- ニッケルに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往症のある医療関係者及び患者には、使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

本製品の作業部形状はフレーム、ミニポイント、カップの3種類があり、軸部はISO 1797-1 軸部形式1(φ2.35 mm)に適合する。歯科用ハンドピースに装着し、回転させて補綴物等を研磨する。作業部には研磨材が含まれ、粒度によりプレポリッシャー、グロスポリッシャー、ハイグロスポリッシャーの3種類があり、作業部の色で識別できる。

#### 1) 形状

作業部形状			
種類(色調)	フレーム	カップ	ミニポイント
プレポリッシャー(グリーン)	ID7071/12	ID7081/12	ID7091/12
グロスポリッシャー(グレー)	ID7171/12	ID7181/12	—
ハイグロスポリッシャー(ピンク)	ID7271/12	ID7281/12	ID7291/12

#### 2) 材質

作業部 : シリコンゴム  
軸部 : 黄銅(ニッケルコーティング)  
研磨材 : 炭化ケイ素

### 【使用目的又は効果】

主にポーセレン及びセラミックからなる補綴物等の研磨に用いる。

### 【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、ソフトタッチで断続的に被研磨物に押し付けて研磨する。

使用回転数:  
20,000回転/分以下(注水時)、5,000回転/分以下(注水なし)

#### 【使用方法に関する使用上の注意】

- 本製品は未滅菌品のため、口腔内で使用する場合は滅菌を行ってから使用すること。
- 最大使用回転数を越えた使用の場合には、破損してけがをするおそれがあるので、使用回転数を厳守すること。
- ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを奥まで挿入して、確実に装着されていることを確認すること。
- 予め患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。
- 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧、高速回転での使用は避けること。

- 無理な角度、過度の加圧、高回転数等の不適切な使用は、オーバーヒートになり補綴物等が損傷することがあるので、注意すること。
- 使用時はグローブ、マスク、保護メガネを着用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- 直射日光、水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

#### 【有効期間】

- 60ヶ月 [自己認証(製造元データ)による]  
使用期限は、包装に記載。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社  
連絡先 : 03-6866-7272  
製造業者 : カー・ハーヴェ社(KerrHawe SA)  
国名 : スイス(Switzerland)