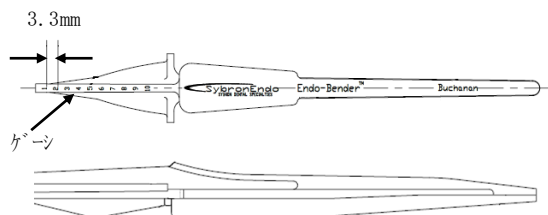


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000
エンド ベンダー

【禁忌・禁止】

ニッケル及びビクロムに対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

全 長：140mm

原材料：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

根管治療に用いられる歯科根管用具（ファイル、ポスト、プラグ、スプレッタ等）の作業部の屈曲に用いる。

【使用方法等】

歯科根管用具（ファイル、ポスト、プラグ、スプレッタ等）の作業部を挟み、屈曲する。

【使用上の注意】

- 1) 本製品で屈曲した歯科用器具は、使用前に損傷の有無を確認してから、使用すること。
- 2) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守点検に係る事項参照）を行うこと。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆、シミ等の原因となることがある。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
2. 洗浄・消毒・滅菌
 - a. オートクレーブ（高圧蒸気滅菌）
 - 1) 使用後は、p H 中性の防錆洗浄液で、精製水を用いて速やかに洗浄する。
 - 2) 圧縮空気とタオルで結合部の水分を完全に除去する。
 - 3) ジョーの開いた状態で、無包装の本製品をトレイの上に平らに置く。
 - 4) 134℃で 6 分間あるいは、121° で 30 分間の滅菌サイクルを実施する。
 - 5) 冷却後、結合部に潤滑材をつける。

b. 乾熱滅菌

- 1) 使用後は、p H 中性の防錆洗浄液で、精製水を用いて速やかに洗浄する。
- 2) 圧縮空気とタオルで結合部の水分を完全に除去する。
- 3) ジョーの開いた状態で、無包装の本製品をラックの上に平らに置く。
- 4) 190℃で 20 分間滅菌サイクルを実施する。
- 5) 冷却後、結合部に潤滑材をつける。

【保守・点検に関する注意事項】

1. 洗浄、消毒、滅菌には、できるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
2. 本製品の滅菌は、高圧蒸気滅菌あるいは乾熱滅菌を行い、低温滅菌（ガス滅菌等）は金属素材に影響を及ぼすことがあるので、行わないこと。
3. 薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	： カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先	： 03-6866-7480
製造業者	： オームコ社 (Ormco Corporation)
国名	： アメリカ (U. S. A.)