

添 付 文 書

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 (31776000)

BS ミラーシステム

【形状・構造及び原理等】


形状・外観：

1. 概要

ミラーシステム

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、ミラーヘッド及びハンドルからなるものである。必要に応じて、口腔内の唾液等の液体、異物を吸引除去する。

2. 形状

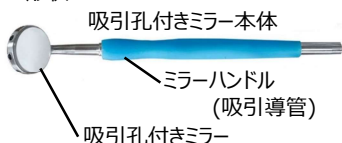

ミラーの側面、底面に吸引孔を有する。



システムパッケージ

3. 構成（ミラーシステムセット）

1) 5 本セット (S9000)

吸引孔付きミラー本体	× 5
吸引ホース	× 2
吸引バルブ接続アダプター	× 2 (11mm、16mm)
クリーニングブラシ	× 1

2) 2 本セット (S9000-2)

吸引孔付きミラー本体	× 2
吸引ホース	× 1
吸引バルブ接続アダプター	× 1 (11mm)
クリーニングブラシ	× 1

4. 構造及び原理

吸引機能を有した歯科用鏡で、鏡部側面に4吸引孔、底面に4吸引孔を有し、唾液吸引ユニットに接続し使用する構造。

5. 名称型番・材質

名 称	型 番	材 質
吸引孔付きミラー本体	S900-1	金属表面反射鏡、ステンレス樹脂外装コーティング
吸引孔付きミラーヘッド	S901-1	金属表面反射鏡
吸引ホース	S901-2	シリコン
ミラーハンドル	S902	ステンレス、樹脂外装コーティング
アダプター (11mm)	S905-1	熱可塑性硬質樹脂
アダプター (16mm)	S905-2	熱可塑性硬質樹脂
アダプター (18mm)	S905-3	熱可塑性硬質樹脂
クリーニングブラシ	S907	ステンレスワイヤー

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、ミラーヘッド及びハンドルからなるものである。必要に応じて、口腔内の唾液等の液体、異物を吸引除去する。

【使用方法等】

- 1) 本品を通常の歯科用鏡として使用する場合は、鏡本体を口腔内に挿入し、口腔内各部の明視をする。
- 2) 本品使用中に、口腔内浸出物を吸引したい場合は、本品に付属のホース及びアダプターを接続し、唾液吸引ユニットに接続して使用する

【使用上の注意】

- 1) 使用前に滅菌すること。(付属品も滅菌可)
(121℃/15 分又は 135℃/3.5 分)
- 2) 滅菌・乾燥後に急冷しないこと。
- 3) 使用前に必ず製品の点検をすること。
- 4) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
- 5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 6) 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等を除去し洗浄、滅菌を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。
2. 高温多湿の場所をさけること
3. 薬液等かからない様に保存すること

【包装】

セット

・ S9000	ミラーシステム 5 本セット	1 セット入/箱
・ S9000-2	ミラーシステム 2 本セット	1 セット入/箱

単品

・ S900-1	吸引孔付きミラー本体	1 本入/パック
・ S901-1	吸引孔付きミラーヘッド	6 個入/箱
・ S901-2	吸引ホース	1 本入/パック
・ S902	ミラーハンドル	1 本入/パック
・ S905-1	アダプター (11mm)	1 個入/パック
・ S905-2	アダプター (16mm)	1 個入/パック
・ S905-3	アダプター (18mm)	1 個入/パック
・ S907	クリーニングブラシ	1 本入/パック

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社ピットストロング
住 所：〒112-0002
東京都文京区小石川 2 丁目 25 番 16 号
電話番号：03-3868-5605

外国製造業者：SEIL GLOBAL Co., LTD.
原産国：大韓民国

ご使用前に取扱説明書を必ずご参照ください。