

再使用禁止**【禁忌・禁止】****再使用禁止**
再滅菌禁止**【形状・構造及び原理等】**

・SIPSIP Foam(フォームドレッシング)は皮膚の創傷を被覆及び保護し、体液を吸収するために患部に当てて使用する。

・材質

TPUフィルム、PUフィルム、ポリウレタンフォームの材料からなる3層構造である

・サイズ

型番	製品寸法	形状	内容量
FM060060	6X6 cm	正方形	5枚入り
FM080080	8X8 cm	正方形	3枚入り
FM150150	15X15 cm	正方形	3枚入り
FM060080	6X8 cm	長方形	5枚入り
FM100150	10X15 cm	長方形	3枚入り
FM100200	10X20 cm	長方形	3枚入り
FM100250	10X25 cm	長方形	3枚入り
FM100300	10X30 cm	長方形	3枚入り

【使用目的又は効果】

皮膚又は口腔内粘膜の創傷を被覆するために用いる、コットン、合成繊維、親水性ポリマー等からなるパッドをいう。ただし、口腔内粘膜に使用する場合は、一時的又は短期的に使用するものに限る。熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

【使用方法等】

・本品を滅菌袋から取り出し再下層の白い剥離紙を剥がし、本品の粘着剤のついている白い面を創部に置き、お肌に軽く固定し、創部周辺に完全密着に貼付されているかを確認し、その後、最上部（紺色表示面）の透明剥離紙を剥がして使用すること

・創傷および周囲の皮膚の臨床状態に応じて、または浸出液が飽和した時に交換すること（フォームドレッシングの端から1cmのところまで膨潤した部分が広がったら交換すること）

【使用上の注意】**1)重要な基本的注意**

- ・Ⅲ度以上の熱傷および乾燥した傷の治療としては使用しないこと
- ・使用する前に創傷に感染の兆候がないか十分に注意を払い確認し、臨床的感染が認められた場合には、直ちに使用を中止し、速やかに適切な治療を行うこと
- ・本品の成分に対する過敏既往歴のある患者には使用しないこと
- ・再利用すると感染が広がる可能性があるため再利用しないこと
- ・貼付中は創部の様子を観察し傷の状態が悪化した場合は使用を中止し、医師に相談すること

2)不具合有害事象

本品使用中は以下の不具合や有害事象発生の恐れがある

- ・創傷の感染症状・創傷及び周囲の皮膚障害（表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎）
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3)その他の注意

- ・包装が破損または汚損している場合には使用しないこと
- ・開封後は速やかに使用すること
- ・表面材を剥がす等、分解して使用しないこと

【保管方法及び有効期間等】**保管方法**

- ・高温多湿、直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管すること
- ・有効期間は包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**<製造販売元>**

株式会社プレシャスケア

<製造元>

Anti-Microbial Savior BioteQ Co.,Ltd. (台湾)

<お問い合わせ先>

045-319-4905