

機械器具 1 3 聴診器  
 一般医療機器 機械式聴診器(13755000)  
**MDF社製 ステソスコープ**

**【禁忌・禁止】**

- ・使用目的以外に使用しない
- ・本品の改造等を行わない
- ・健全な皮膚以外の場所にチェストピースをあてない

**【形状・構造及び原理等】**

本品は機械式聴診器であり、素材や形状によりいくつかの種類がある

**構造・構成ユニット**



シングルヘッド・ダイアフラム型	
シングルヘッド・ダイアフラム型	
デュアルヘッド・ダイアフラム・ベル型	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、(交換可能ダイアフラム型、交換可能ベル型)	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、ベル型	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、ベル型	

型式	構成品の代表的写真
シングルヘッド・ダイアフラム型	

**取扱説明書を必ずご参照ください。**

デュアルヘッド、ダイアフラム型、ベル型	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、ベル型	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、ベル型	
デュアルヘッド、交換可能ダイアフラム型、交換可能ベル型	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、(交換可能ダイアフラム型、交換可能ベル型)	
デュアルヘッド、ダイアフラム型、(交換可能ダイアフラム型、交換可能ベル型)	
デュアルヘッド、交換可能ダイアフラム型、交換可能ベル型	



### 作動・動作原理

採音部、チェストピースによって集めた音を、Yチューブ、耳管を通じて操作者の両耳に伝える。

### 【使用目的又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式の聴取装置をいう。通常、リスニングヘッドに膜があり、この膜が分岐 Y 字型チューブによってイヤークリップ（ユーザの耳に挿入する）を備えたヘッドギアに接続されている。通常、以下の 2 つの形式がある：1.臨床・病棟活動に用いる汎用聴診器。2.心臓専門医が使用する強化聴診器。

### 【使用方法等】

1. 耳管と Y チューブが別々になっている場合は、耳管と Y チューブを正しく取り付ける。
2. 耳管を正しい方向になるようにし、イヤークリップを両耳にはめ、患者の体表面にチェストピースの採音部をあてがい、聴診する。
3. デュアルヘッドの聴診器は両面に採音部を有している。チェストピースシステムを回し、チェストピースシステムについている印を聴診する方の採音部側に向け、聴診する。
4. 交換可能ダイアフラム型、交換可能ベル型はそれぞれの型番内において採音部を交換することができる。

### 【使用上の注意】

- ・使用前に、本品に使用上で差し支えがある様な品質瑕疵がないことを確認する。
- ・使用前に、本品の使用が適切でないと判断された場合は、本品を使用しない。
- ・使用中に、本品の使用が適切でないと判断した場合は速やかに本品の使用を中止し、代替手段による処置を行う
- ・完全に洗浄するときは、イヤーチップをイヤーチューブからはずして行う。
- ・消毒のため薬液に浸したり滅菌したりしない。

### 【保管及び有効期限】

- ・高温多湿・直射日光を避け、常温常圧、水のかからない場所で保管する。

取扱説明書を必ずご参照ください。

**【保守・点検に係る事項】**

- ・ 毎回使用前に、聴診器全体を清潔にする。
- ・ 清潔なコットン製の布または綿棒とイソプロピルアルコール液を用いて、汚れた部分を全て拭きとる。
- ・ Y チューブは、過度の熱、冷気、溶剤、湿気及び油脂質に長時間さらさない。

**【包装】**

1セット、1本/箱

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者：株式会社プレシヤスケアお問い合わせ先：045-319-4905

製造業者：MDF Instruments Medifriend Inc.

(中国)

**取扱説明書を必ずご参照ください。**