

## MDF社製 打診器

## 【警告】

本品を誤って落下させると破損の恐れや、操作者、患者がケガをする恐れがある。

## 【禁忌・禁止】


1. 本品を改造しない。
2. 破損する恐れがあるため、本品を折り曲げない。
3. 本品を使用前に破損、ガタ、ゆるみ、汚れ、摩耗、欠損、欠陥等、その他の使用上で差支えがある品質瑕疵が無い事を目視又は指触で確認し、異常が見られたら使用しない。
4. 本品は、使用目的以外に使用しない。

## 【形状・構造及び原理等】

弾力性のあるPVC又はシリカゲルのヘッド、金属又はABS樹脂又はナイロン製のハンドル及び触覚ブラシ（一部製品を除く）から構成される。


## 形状

トレムナー式（代表例）

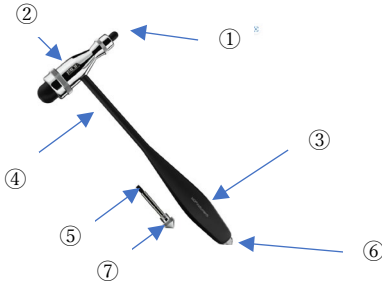

①マレット ②ヘッド ③柄 ④ハンドル ⑤触覚ブラシ ⑥触覚ブラシ柄 ⑦触覚ブラシ格納部

パピンスキー式（代表例）

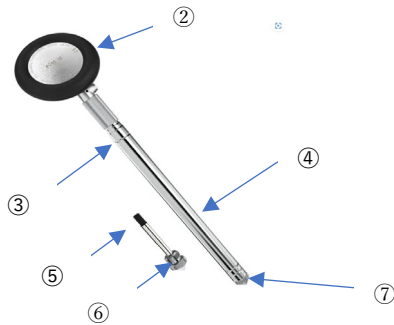

## 原理

手操作によりヘッドで検査部位に刺激を与える。

## 【使用目的又は効果】

ハンドル、軸及びヘッドからなる金属製又はABS樹脂又はナイロン製の器具をいう。反射を検査するため身体に力を伝達するために用いる。ハンドルは手のひらに適合するように設計され、丸く軸に向かって先細になり、この軸の先端にヘッドがある。本品は神経学的検査に用いる。

## 【使用方法等】

1. 使用前  
①本品を使用前に破損、ガタ、ゆるみ、汚れ、摩耗、欠損、欠陥等、その他の使用上で差支えがある品質瑕疵が無い事を目視又は指触で確認する。  
②必要に応じて洗浄又は清拭する。
2. 使用方法  
①ヘッドを検査部位にあてがい、ハンドルを手で操作して叩き、患者の反応を観察する。  
②触覚ブラシは検査部位の皮膚に当て、異常の有無あるいは強弱をはかる。

## 【使用上の注意】

本品を健全な皮膚以外に使用しない。

## 【保管方法及び有効期間等】

## 保管方法

清潔な場所で保管する。

## 【保守・点検に係る事項】

## 使用者による保守点検事項

1. 毎回使用前に本品全体の汚れた部分を拭き取る。
2. 本品のお手入れには、イソプロピルアルコール液又は中性洗剤と清潔なコットン製の布を使用する。
3. 本品を過度の熱、冷機、溶剤、湿気及び油（皮膚から分泌される）脂質に長時間さらさない。
4. トレムナー式は、先端のマレットからヘッドを外して、洗浄・消毒・乾燥をして組み立てる。
5. パピンスキー式は中性洗剤と清潔なコットン製の布を使用し、全体を拭き乾燥させる。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>

株式会社プレシヤスケア

<製造元>

MDF Instruments Medifriend Inc. (中国)

<お問い合わせ先>

045-319-4905