

一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000
熱傷被覆・保護材 11322101

再使用禁止

SIPSIP FoamLite(シップシップ フォームライト)

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

・SIPSIP FoamLite(シップシップ フォームライト)は皮膚の創傷を被覆及び保護し、創傷部位を支持するために患部に当てて使用する。

・材質

ポリウレタンフォーム(PU)の材質からなる 単層構造である。

・本体の寸法及び形状

SIPSIP FoamLite(シップシップ フォームライト)は非粘着式の1タイプで計11種類です。

サイズ	形状
5X5～10x25cm	正方形・長方形

・原材料

本体	ポリウレタンフォーム
----	------------

* 剥離紙なし

【使用目的又は効果】

皮膚の創傷を被覆するために用いる、親水性ポリマー等からなるパッドをいう。熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いるパッドをいう。

【使用方法等】

(1) 本品を貼付する前に、創部をきれいにし、創部および周辺の皮膚を清潔にしてください。

(2) 創部の大きさに合った本品を選択し、創部より2～3cm大きいサイズを使用してください。

(3) 本品を創部の中心に覆い、肌に密着させてください。その後、適切な包帯、テープ、またはその他の二次敷材を使用して固定してください。

(4) 創傷および周囲の皮膚の臨床状態に応じて、または浸出液が飽和した時に交換すること。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

- ・Ⅲ度以上の熱傷および乾燥した傷の治療としては使用しないこと。
- ・使用する前に創傷に感染の兆候がないか十分に注意を払い確認し、臨床的感染が認められた場合には、直ちに使用を中止し、速やかに適切な治療を行うこと。
- ・本品の成分に対する過敏既往歴のある患者には使用しないこと
- ・再利用すると感染が広がる可能性があるため再利用しないこと。
- ・貼付中は創部の様子を観察し傷の状態が悪化した場合は使用を中止し、医師に相談すること。

2) 不具合有害事象

本品使用中は以下の不具合や有害事象発生の恐れがある。

- ・創傷の感染症状・創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
- ・固着
- ・壊死組織の増加
- ・疼痛

3) その他の注意

- ・包装が破損または汚損している場合には使用しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・表面材を剥がす等、分解して使用しないこと。

【保管方法】

- ・高温多湿、直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売元>

株式会社プレシヤスケア

<製造元>

Anti-Microbial Savior BioteQ Co.,Ltd.(台湾)

<お問い合わせ先>

045-319-4905