

医療用品 3 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (70976000)

# ニトリル検査検診用グローブ KA300

## 【禁忌・禁止】

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

本品は、ニトリルゴムを主材料とする、検査・検診用使い捨て手袋である。左右兼用であり、指先にエンボス加工が施されている。パウダーなし、未滅菌である。

## 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

## 【使用方法等】

手袋はパッケージから取り出し、装着して使用する。

## 【使用上の注意】

### 1. 使用注意

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹等が発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止すること。必要に応じて、医師に相談し適切な処置を行うこと。

### 2. 重要な基本的注意

- 1) 薬品や薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認して使用すること。
- 2) 包装が破損しているものや、汚れているもの、製品そのものに異常（破損やピンホール等）が見られるものは使用しないこと。
- 3) 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- 4) 複数の患者には使用しないこと。

### 3. その他の注意

使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。  
包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 耐用期間：製造年月より5年 [自己認証(製造業者データ)による]

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### <製造販売業者>

KAEI株式会社  
大阪市中央区南船場2-4-8 TEL:06-6940-4085

### <製造業者>

山東英科医療製品有限公司  
\* Zhonghong Pulin Medical Products CO.,LTD.  
\* Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.