

2005年05月10日（新様式第2版）

2002年10月10日（新様式第1版）

届出番号：13B3X00365000601

器39 医療用鉗子

一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000

コーヌスプライヤー

【性能、使用目的、効果又は効能】

コーヌスクラウンの内冠と外冠を外す時に、クラウンの精度が良いほど外れにくいので、この時に使用するプライヤーである。

嘴部先端部にはダイヤモンドが電着されていて、内冠を把持した時に滑らないようになっている。

【使用上の注意】

- 1 **注意事項の厳守**：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- 2 ステンレス鋼で出来ているが使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 3 臼歯用には#1、前歯用には#3と使い分ける。
- 4 先端部は細く強度的に弱いので、急激に過度の力を加えないこと。破折の原因となる。
- 5 **取扱いについて**：器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 6 コーヌスクラウンの離脱以外の目的で使用しない事。
- 7 ダイヤモンドは使用頻度により離脱する。
- 8 **二次加工の禁止**：折損等の原因になるので、器具の二次加工(改造)を行わないこと。
- 9 **メッキの剥がれ**：金属線を把持するのでメッキが剥がれる事があります。特に溝の部分は。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、嘴部にキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
時折、関節部にミシン油を塗布する。

【包装】

紙箱に1個入包装（内包はポリ袋）又はポリ袋かビニール袋に1個入包装

【形状、構造及び原理】

*SUS420J2 #1(臼歯),#2(パネストッパー),#3(前歯)
*ダイヤモンド付



【禁忌・禁止】

- *歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
- *使用目的以外には使用しないこと。
- *劣化や異常が見られた場合は器具の使用を中止すること。
- *器具の形態変更や改造等はないこと。
- *器具を落下したり、強い衝撃を与えないこと。

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名 (有)木村鉗子製作所
住所 〒131-0033 東京都墨田区向島1-18-9
電話番号 03-3623-1232
ファックス 03-3623-1232
ホームページ <http://www.kimura-kanshi.com/>
Eメール kimura.kanshi@nifty.com