


「リハビリ用足底圧センサー Waltwin (ワルツイン) (AL-210)」の付属品

Waltwin インソール S セット (AL-210S) / Waltwin インソール M セット (AL-210M) / Waltwin インソール L セット (AL-210L)

【形状・構造及び原理等】

本製品は「リハビリ用足底圧センサー Waltwin (ワルツイン) (AL-210)」(以下、ワルツイン)の付属品(定期交換する消耗品)である。ワルツインは固定ベルト、中継ボックス、収納バッグ、専用ソフトウェアおよび本製品で構成される。

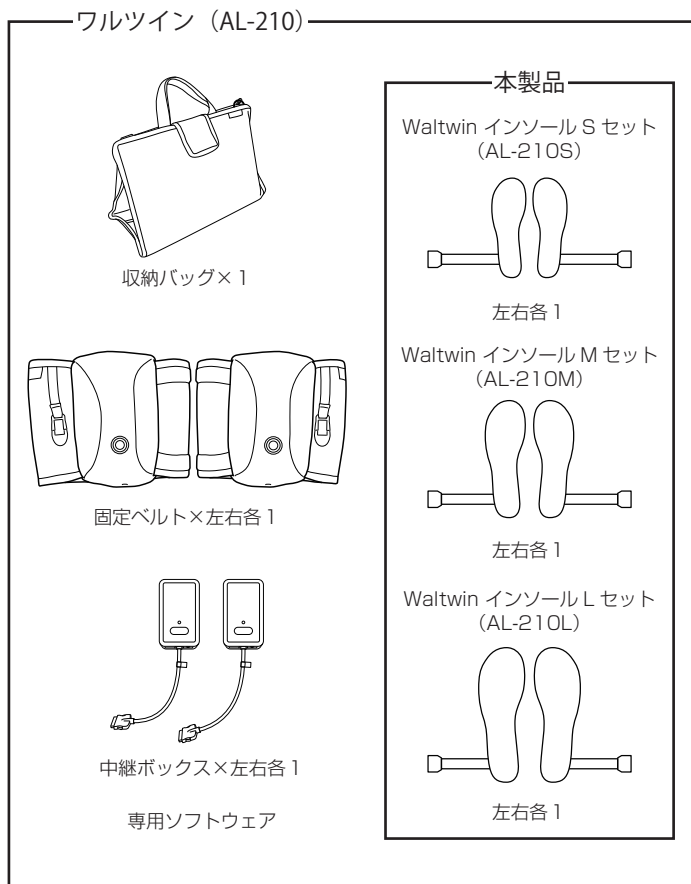

■主材料

インソール	EVA 樹脂、PET 樹脂、ASA 樹脂
-------	----------------------

■動作原理

インソール内のセンサーにより足底部にかかる圧力を計測し、左右全体の圧力を 100 とした場合の各部位にかかる圧力の割合 [%] を表示する。

【使用目的又は効果】

歩行および立位動作時の足底圧を測定し、圧分布を確認することにより、歩行および立位動作に関連した問題の診断および矯正措置計画の支援に用いることを目的とする。

【使用方法等】

本製品の使用方法はワルツインの添付文書および取扱説明書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

< 保管状態 >

- 収納バッグに入れて保管してください。
- 添付文書および本製品は紛失しないよう、大切に保管してください。

< 保管する場所 >

- 高温・多湿・低温・乾燥・ほこりの多い場所を避けてください。
- 温度 -10 ～ 60℃、湿度 20 ～ 80%RH、大気圧 800 ～ 1060hPa の環境で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 点検

本製品の保守・点検に係る事項は、ワルツインの添付文書および取扱説明書を参照してください。

2. お手入れ

< お手入れのしかた >


以下の 2 つの方法のいずれかの手順で行ってください。

●方法 1

- ① 水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって拭いてください。
- ② 水でひたした布をよくしぼって、残った洗剤分を拭き取ってください。
- ③ 乾いた布で残った水分を拭き取ってください。

●方法 2

- ① 一般用消臭剤、消臭スプレーなどを軽く吹きかけてください。または、一般用アルコールティッシュで、表面を軽く拭いてください。
 - ② 乾いた布で残った水分を拭き取ってください。
- ※ インソールコネクターは絶対に濡らさないでください。

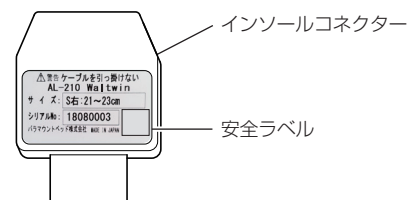

< 滅菌のしかた >

靴・スリッパ用の紫外線滅菌機で滅菌を行ってください。滅菌の条件などは、使用する紫外線滅菌機の取扱説明書の指示に従ってください。

3. 消耗部品と交換周期

インソール S・M・L : 1 年 (6 万歩)

※ ソフトウェアで使用期限のお知らせが表示されます。

※ 交換周期は参考値であり、使用状態によって変わる場合があります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

1)製造販売業者

■パラマウントベッド株式会社

☎(0475)81-3000(千葉工場)

2)販売業者

<パラマウントベッド株式会社>

☐本社

〒136-8670 東京都江東区東砂2-14-5 東京支店

☎(03)3648-1171(代)

☐札幌支店

〒060-0062 札幌市中央区南2条西13-318-11

☎(011)271-1181(代)

☐仙台支店

〒984-0015 仙台市若林区卸町2-3-3

☎(022)239-5211(代)

☐さいたま支店

〒338-0001 さいたま市中央区上落合9-4-7

☎(048)852-0707(代)

☐横浜支店

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-3-33

☎(042)795-8800(代)

☐名古屋支店

〒461-0001 名古屋市東区泉1-20-17

☎(052)963-0600(代)

☐大阪支店

〒550-0001 大阪市西区土佐堀2-3-33

☎(06)6443-8791(代)

☐広島支店

〒733-0011 広島市西区横川町3-8-5

☎(082)293-1311(代)

☐福岡支店

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-14-20

☎(092)461-1131(代)