

※ 一般医療機器 医4 救急絆創膏
※ JMDNコード 34864000

大正バンS

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【組成・性状・構造】

- パッド：不織布ポリネットガーゼ
- 粘着テープ：アクリル系粘着剤
- セパレーター：シリコン加工紙

【使用目的、効能・効果】

- 創傷面の保護


【操作方法又は使用方法等

(用法・用量を含む)】

- 創傷面を清潔にし、パッド部分を
あてて貼りつける。

<使用法>

袋の端を両端に開き中身を取り出します。
まず白い剥離紙を片方だけはがし、パ
ッドを傷口に当てて貼りつけます。次に他
方の剥離紙を静かに引きながら残りの部
分を貼ってください。

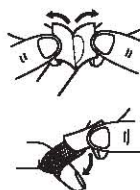

※【使用上の注意】

1. パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、患部を清潔にし、貼り替えること。
2. 1日1～2回、貼り替えること。
3. 本品の使用により、発疹・発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
4. 皮膚刺激の発生原因になりますので、長時間貼付したり急激にはがしたりしないこと。
5. 刺激に弱い目の周囲、顔面等やわらかい皮膚面には注意して使用すること。
6. 袋が破れたり、開けられたりしない限り滅菌効果を保ちます。
7. 患部からはがした製品は再使用しないこと。

【貯蔵方法及び有効期間等】

1. 小児の手のとどかない所に保管すること。
2. 直射日光をさけ、湿気の少ないすずしい所に保管すること。
3. 品質保持期限を経過したものは使用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 再使用禁止

*【包装】

- 普通サイズ：19mm×72mm(パッドサイズ 13mm×24mm)
200枚入り紙包装

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

共立薬品工業株式会社

〒635-0103 奈良県高市郡高取町清水谷1085番地

*【お問い合わせ窓口】

大正富山医薬品株式会社 お客様相談室

〒170-8635 東京都豊島区高田3-25-1

電 話 03-3985-5599

※ 発 売
 大正富山医薬品株式会社
東京都豊島区高田3-25-1

※ 製造販売元・製造元
 共立薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1085番地