

2019年 7月改訂 (第4版)(:改訂箇所)
2017年 11月改訂 (第3版 新記載要領に基づく改訂)
2012年 10月改訂 (第2版)

届出番号 27B2X00038000007

医療用品(4) 整形用品 JMDNコード34864000
一般医療機器 救急絆創膏

ショットキープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド: レーヨン、合成繊維

粘着テープ: ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤

本品は滅菌済みである。

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

使用部位を清潔にしてパッド部分を穿刺部に当て、粘着テープで固定して使用してください。

【使用上の注意】

使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。

粘着面を穿刺部に貼らないでください。

小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。

本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。

包装が破損または汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光が当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

使用期限: 使用期限: 個装箱に記載

製造日より、5年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売者〕 株式会社 共和
大阪府泉佐野市鶴原4-4-81

〔お客様相談窓口〕 TEL 06-6658-7111