

2017年 11月改訂（第3版）
2014年 12月改訂（第2版 新記載要領に基づく改訂）

届出番号 27B2X00038000014

医療用品(4) 整形用品 JMDNコード34864000
一般医療機器 救急絆創膏
エアウォールⅣ切り込みタイプ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

粘着テープ：ポリウレタン、ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
本品は滅菌済みである。

【使用目的又は効果】
創傷面の保護

【使用方法等】
使用部位を清潔にして穿刺部の周辺を粘着テープで固定して使用してください。

【使用上の注意】
使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。

皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らないでください。

穿刺部から滲出液や出血が見られる場合は使用しないでください。

明らかに感染を有している部位には使用しないでください。貼付部位は感染症・皮膚障害等の徴候及び本品の破れ・浮き等があるかどうか確認するため毎日観察してください。本品の使用により、感染症及び皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。

包装が破損または汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

剥がす際は、皮膚障害やカテーテルの抜去を防ぐため、皮膚やカテーテルを押さえながらゆっくり剥がしてください。

【保管方法及び有効期間等】
直射日光が当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
小児の手の届かない所に保管してください。
使用期限： 包装袋及び個装箱に記載
製造日より、3年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
〔製造販売者〕 株式会社 共和
大阪府泉佐野市鶴原4-4-81

〔お客様相談窓口〕 TEL 06-6658-7111