

2017年 11月改訂（第2版）
2016年 9月改訂（第1版）

届出番号 27B2X00038000018

医療用品(4) 整形用品 JMDNコード34864000
一般医療機器 救急絆創膏
エアウォールパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

パッド：セルロース、ポリプロピレン、ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル共重合体
粘着テープ：ポリウレタン、アクリル系粘着剤
本品は滅菌済みである。

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用してください。

【使用上の注意】

使用部位とそのまわりを清潔にし、水気をよく取って使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。

皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らないでください。

粘着面を患部に貼らないでください。

小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。

明らかに感染を有している部位には使用しないでください。貼付部位は感染症・皮膚障害等の徴候及び本品の破れ・浮き等があるかどうか確認するため毎日観察してください。本品の使用により、感染症及び皮膚障害（発疹・発赤・かゆみ等）と思われる症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

パッド部が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りがわるくなる場合がありますので、貼り替えてください。

救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。

滅菌効果が損なわれますので、滅菌袋は使用時に開封してください。

包装が破損または汚損している場合は、滅菌効果が損なわれますので使用しないでください。

剥がす際は、皮膚障害を防ぐため、皮膚を押さえながらゆっくり剥がしてください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光が当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手の届かない所に保管してください。

使用期限： 包装袋及び個装箱に記載
製造日より、3年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売者〕 株式会社 共和
大阪府泉佐野市鶴原4-4-81

〔お客様相談窓口〕 TEL 06-6658-7111