

2021年3月作成（第1版）

届出番号 27B2X0003800020

医療用品 03 手術用手袋及び指サック JMDNコード 70976000
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 **プラスチックグローブNo. 380-N**

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

ポリ塩化ビニル製(可塑剤：フタル酸ジイソニル)の未滅菌使い捨て検査検診用手袋
左右兼用

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
- ・薬品、薬液等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認して使用すること。
- ・製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・刃物等鋭利なものに触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- ・複数の患者には使用しないこと。
- ・火・熱・熱湯(60℃)などの熱源に直接触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。
- ・蛍光灯や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売者〕 株式会社 共和
大阪府泉佐野市鶴原 4-4-81
TEL 06-6658-7111

外国製造業者及び外国製造所の国名 BLUE SAIL MEDICAL CO., LTD (中国)