

医療用品 03 手術用手袋及び指サック JMDNコード70976000

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋

プラスチックグローブNo.390-N

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

ポリ塩化ビニル製(可塑剤:フタル酸ジイソノニル)の未滅菌使い捨て検査検診用手袋
左右兼用

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

取り出し口より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。

薬品、薬液等によって膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認して使用すること。

製品に破損、変形、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。

刃物等鋭利なものに触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。

複数の患者には使用しないこと。

火・熱・熱湯(60℃)などの熱源に直接触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。

蛍光灯や強い人工光を避け、エックス線器機等に近づけないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売者〕 株式会社 共和
大阪府泉佐野市鶴原4-4-81

外国製造業者及び外国製造所の国名 BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD(中国)