

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

オカモトMS-テープ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・粘着部を創傷面に当てないこと。

** * 【形状・構造及び原理等】

本品は、粘着テープにポリネット巻綿包(パッド)を貼り付け、粘着部を剥離紙で覆い、滅菌バッグに入れてエチレンオキシドガス(EOGガス)で滅菌したものです。

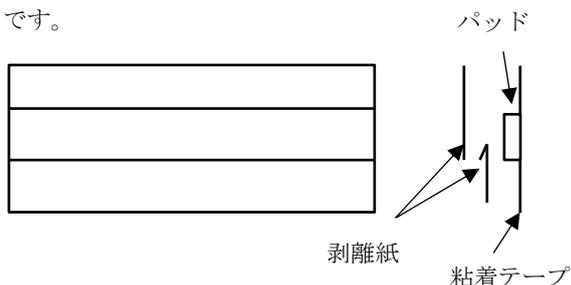

〈体に接触する部分の原材料名〉

粘着テープ：塩化ビニルフィルム／アクリル系粘着剤

パッド：綿包／ポリエチレンネット

品名コード	サイズ	包装	パッド部	粘着部
GN101	S	20枚	15mm×150mm	40mm×150mm
GN102	M	20枚	25mm×200mm	60mm×200mm
GN103	L	20枚	40mm×250mm	80mm×250mm

* 【使用目的又は効果】

創傷面の保護

* 【使用方法等】

創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面にあて、両側のテープで固定し、使用してください。

** * 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品はEOG滅菌済ですので、使用時に開封してください。使用前に滅菌バッグが破損した場合は、使用しないでください。
2. 本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。また、以前に粘着テープ等を使用し「かゆみ」「発疹」等のあった方は十分注意して使用してください。
3. パッド部が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しいものと貼り替えてください。

** * 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 2) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 3) 本品はケース表示の使用期限内にご使用ください。

2. 有効期間

有効期間：製造後5年(自己認証による)

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

〔製造販売業者〕：キョーリキ株式会社

住所：〒861-5514 熊本県熊本市北区飛田3丁目3-65

電話番号：096-345-1234(代表)

■ 販売業者：オカモト株式会社

住所：〒113-8710 東京都文京区本郷3丁目27番12号

電話番号：03-3817-4172