

医療用品(4) 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏 JMDNコード 34864000

## レジバン

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・粘着部分を創傷面に当てないこと。

\*\*

#### \*【形状・構造及び原理等】

本品は、粘着テープにポリネット付き不織布(パッド)を貼り付け、粘着部を剥離紙で覆い、滅菌紙(コールドシール)に入れてエチレンオキサイドガス(EOGガス)で滅菌したものです。

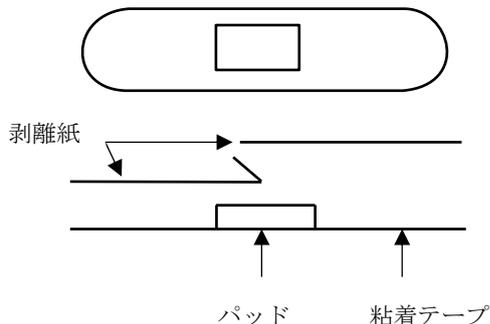

〈体に接触する部分の原材料名〉

粘着テープ：塩化ビニルフィルム／アクリル系粘着剤

パッド：不織布(レーヨン、ポリエステル)

／ポリエチレンネット

品名コード	包装	パッド	粘着テープ
GN301	200枚	13mm×23mm	19mm×72mm

#### \*【使用目的又は効果】

創傷面の保護

#### \*【使用方法等】

創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面にあて、両側のテープで固定し、使用してください。

\*\*

#### \*【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 本品はEOG滅菌済ですので、使用時に開封してください。使用前に滅菌紙が破損した場合は、使用しないでください。
2. 本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。また、以前に粘着テープ等を使用し「かゆみ」「発疹」等のあった方は十分注意して使用してください。
3. パッド部が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しいものと貼り替えてください。

\*\*

#### \*【保管方法及び有効期間等】

##### 1. 保管方法

- 1) 小児の手の届かないところに保管してください。
- 2) 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 3) 本品はケース表示の使用期限内にご使用ください。

##### 2. 有効期間

有効期間：製造後5年(自己認証による)。

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

〔製造販売業者〕：キョーリキ株式会社

住所：〒861-5514 熊本県熊本市北区飛田3丁目3-65

電話番号：096-345-1234(代表)

■販売業者：オカモト株式会社

住所：〒113-8710 東京都文京区本郷3丁目27番12号

電話番号：03-3817-4172