

牽引フックMIセット

再使用禁止

【警告】

1) 本品は滅菌済であるので、再使用しないこと。[二次感染のリスクが発生し、患者及び使用者への感染、伝染を引き起こす恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

1. 開頭時に、皮膚弁、筋肉弁、硬膜弁の翻転に使用する以外の目的には、使用しないこと。[使用目的又は効果の項参照]

【形状・構造及び原理等】

《構成》

※本品は、先端湾曲した軸を持つ釣り針状の鉤にて、組織端を引っ掛け広げて、保持するための器具である。糸なしの場合もある。



1. 組成

鉤：ステンレススチール

糸：白シルクブレード

※輪ゴム材質：天然ゴム、イソプレンゴム、ポリウレタンゴム

※2. 形状・構造

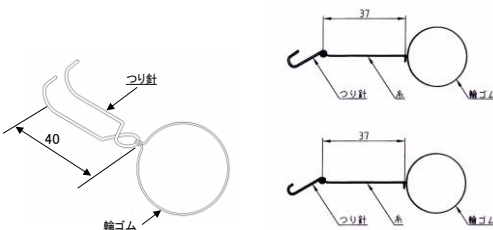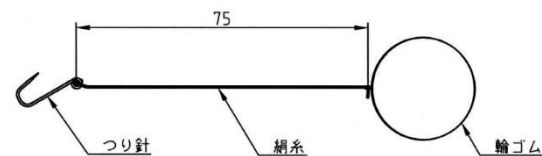

3. 原理

釣り針状の鉤に組織端を引っ掛け、輪ゴムによる引っ張り力を利用して、開頭部の皮膚弁、筋肉弁、硬膜弁の翻転を行う。

【使用目的又は効果】

先端湾曲した軸を持つ釣り針状の鉤にて、組織端を引っ掛け広げて、保持するための器具。

【使用方法等】

1) 本製品は、滅菌済み品ですので、タイベック包装材料より、取り出しご使用ください。

【使用法に関する使用上の注意】

1) 釣り針に不用意に鉗子等で、過大な力で把持し、表面に傷をつけないようにすること。

※2) 本製品の内、天然ゴム（ラテックス）を使用している製品は、アレルギーにより炎症を起こす可能性があるため、使用前にアレルギーの有無を確認すること。

【使用上の注意】

《使用注意》

- 1) 輪ゴムを伸ばし過ぎると釣り針が外れる場合があるので、全長30 cm以上に伸ばさないこと。
- 2) 使用前に、包装材料に傷、裂け目等がないことを確認してください。
- 3) 手術医は、本品使用に際し、手術手技について十分に熟知していること。
- 4) 使用後は医療用廃棄物として適切な処理をすること。
- 5) 包装材料が損傷している場合には、必ず廃棄すること。

《不具合・有害事象》

重大な不具合

- 1) 針折れ
- 2) 糸切れ
- 3) 糸抜け
- 4) ゴム切れ

【保管方法及び有効期間等】

※1. 有効期間

天然ゴム 1年。

イソプレンゴム 5年。

ポリウレタンゴム 5年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック

電話番号：03-3818-4041