

牽引フック MPセット

再使用禁止

【警告】

- 1) 本品に亀裂・傷・汚れ・摩耗などの異常があるものは使用せず、新しいものに交換すること。[本来の性能が発揮されない恐れがあるため]
- 2) 創口の大きさに適した製品サイズ、数量を選択すること。[必要な術野を確保できない恐れ、また、局所的に、組織に過度な負荷をかける原因になりうるため]

【禁忌・禁止】

「適用対象（患者）」

- 1) 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。[アレルギー反応が発現する恐れがあるため]

「使用方法」

- 1) 再使用禁止 [結束部において、十分な洗浄ができないため]
- 2) 再滅菌禁止 [無菌性が担保できないため]
- 3) 本品を加工、改造しないこと。[劣化・故障・破損等の原因になりうる]
- 4) 使用目的以外の用途には使用しないこと。[故障・破損等の原因になりうる]




【形状・構造及び原理等】

1. 組成

- 鉤：ステンレス
 糸：シルクブレード
 輪ゴム：天然ゴム、イソプレンゴム、ポリウレタンゴム

2. 形状・構造

代表的形状

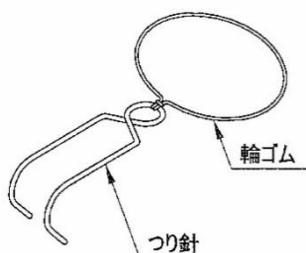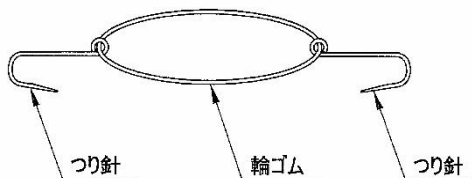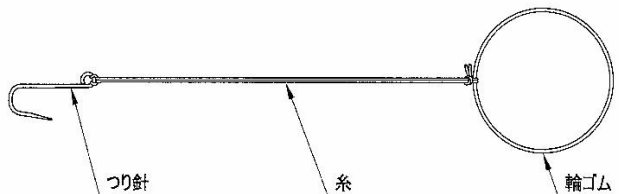

【使用目的又は効果】

本品は、遠位部が丸い先端又は尖った先端に向かって湾曲した、軸様のハンドルを持つ、つり針状の鉤である。その鉤を組織に引っ掛けることにより、術野を覆う組織を広げ、牽引、保持するための器具である。

【使用方法等】

- 1) 本品は滅菌品であるので、開封後直ちに使用することができる。
- 2) 組織につり針状の鉤を掛け、輪ゴムによる張力を利用して、組織を広げ保持する。その際、輪ゴム側は鉗子や持針器等を介して固定することもできる。
- 3) つり針の先端が適切に組織に掛かっているか、適切な張力でつり針が引っ張られているかを確認すること。
- 4) 本品を取り外す際は急な操作は避け、徐々に緊張状態から解放すること。
- 5) 使用後は医療用廃棄物として、施設所定の方法で適切に処理すること。

【使用上の注意】

1. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 輪ゴム又は糸の予期せぬ破断を想定し、飛散した部材が組織等に重大な損傷を与えないよう、針の装着箇所、牽引方向、引張力を考慮して取り付けすること。
- 2) 取外しの際、本品に付着した組織等が飛散しないよう、十分に注意すること。

2. 使用注意

- 1) 本製品のうち、天然ゴム（ラテックス）を使用している製品については、発疹、発熱、呼吸困難等、様々なアレルギー症状を引き起こす恐れがあるため、使用前にアレルギーの有無を確認し、アレルギー反応のある患者に対しては使用しないこと。

3. 重要な基本的注意

- 1) 使用前に、包装材料に傷、裂け目等がないことを確認すること。
- 2) 包装材料が損傷している場合には、必ず廃棄すること。
- 3) 一旦開封したものは、未使用であっても廃棄すること。
- 4) 鉗子や持針器等で把持する際、不用意に過大な力をかけることにより、つり針表面に傷を付けないよう注意すること。
- 5) 輪ゴムを伸ばしすぎると、断裂や釣り針が外れる恐れがあるため、必要以上に伸ばさないこと。
- 6) 電気メス等を用いる際は、本品（つり針・糸・ゴム）と接触しないよう十分注意すること。

4. 不具合・有害事象

- 1) 重大な不具合
不適切な保管、取扱いの状況下においては、破損（針折れ・糸切れ・糸抜け・ゴム切れ等）、変形、劣化等が生じる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、清潔な場所で、室温にて保管すること。
- 2) 変形や損傷の原因となりうるため、本品に荷重のかからない状態で保管すること。

2. 有効期間

- 天然ゴム：1年
 イソプレンゴム：5年
 ポリウレタンゴム：5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック
 電話番号：03-3818-4041