

吸引カップ

【警告】

本品に亀裂、傷、汚れ、摩耗などの異常があるものは使用せず、新しいものに交換すること。[破損の恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

本品を加工、改造しないこと。[本来の性能が発揮されないことがあるため]


【形状・構造及び原理等】

1. 組成

カップ：ウレタン樹脂
パット：シリコーンゴム
キャップ：シリコーンゴム

2. 形状・構造

代表的形状

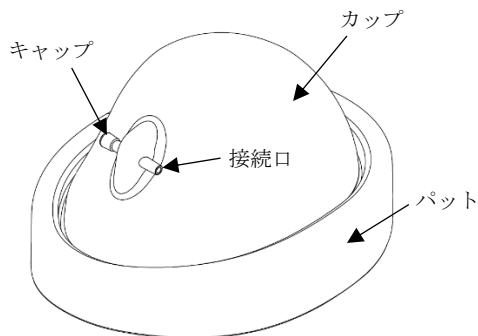

【使用目的又は効果】

本品は、吸引器具に接続し、吸引を調節又は指示する器具である。
本品は、汎用吸引チップで、再使用可能である。

【使用方法等】

1) 使用前

使用前に必要なに応じて洗浄、消毒してください。

2) 使用方法

- (1) カップとパットを空気漏れがないよう適切に組合せる。
- (2) カップの接続口に吸引器を接続する。
(接続口は2箇所あるが1箇所はキャップを取付ける。)

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 使用前に本品に不具合がないか外観検査を実施し、不具合が認められる場合には使用しないこと。
- 2) 本品の使用により感作又はアレルギー反応を呈する可能性がある患者には使用しないこと。
- 3) 吸引する際は、併用する吸引器に本品の接続口が確実に取付けられていることを確認すること。
- 4) 本品に破損を及ぼすような過剰な負荷をかけないように、適切に使用すること。

2. 重要な基本的注意

- 1) 医師は、本品使用に際し、手技について十分に熟知していること。
- 2) 本品の使用中に破損、変形、傷、緩み等の異常が現れた場合は、ただちに使用を中止すること。

3. その他の注意

1) 洗浄、消毒：

- (1) 使用後は必要に応じて洗浄、消毒を行い、保管すること。
- (2) 金属タワシ、クレンザー等は、表面を損傷するので使用しないこと。
- (3) 洗浄、消毒後は、衛生的な環境で直ちに乾燥させること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法・保管方法

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて、室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 ベアーメディック
電話番号：03-3818-4041