

プロフィールブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

スマートプロフィールブラシ
形 状 :



軸 の 種 類 : ISO 1797-1 タイプ1 (RAタイプ)

材 質 : <ブラシ>ナイロン
<軸> 黄銅、ニッケルめっき

ブラシの色及び硬さ : 青 … ハード
紫 … ミディアム
ピンク … ソフト

ペンシルエンドブラシ

形 状 (例) :



軸又はねじの種類 : 次のいずれかである。
ISO 1797-1 タイプ1 (RAタイプ)
ANSI B1.1 N1-72 UNF (ねじ)
ANSI B1.1 N1-64 UNC (ねじ)

材 質 : <ブラシ> 次のいずれかである。
ブタ毛(黒、白)
ナイロン
<軸又はねじ>黄銅、ニッケルめっき

ブラシの硬さ : ハード

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具である。

【使用方法等】

- ・使用前に滅菌する。(高圧蒸気滅菌/各医療機関により検証され確認された滅菌条件による。例 134-137°C 3分以上)
- ・適合するハンドピースに装着して使用する。ねじタイプの柄は、直接あるいは別売りのマンドレルに接続して、適合するハンドピースに装着する。
- ・推奨回転数 : 5,000-10,000 rpm
- ・歯面研磨材を用いて清掃、研磨する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品を接続する歯科用ハンドピースは、以下の内容に適合する機器に限定する。
 - ・本品のシャンク(軸)、ねじ又は本品を接続するマンドレルを確実に把持することが可能である。
 - ・使用中、規定する回転数での制御が可能である。
 - ・注水機能を備えている。(注水する場合)
- ・接続する機器の取扱説明書等に従ってシャンク(軸)を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。また、ねじタイプは確実に奥までねじを締め、動かないことを確認すること。
- ・予め患者の口腔外で回転させ、振れがないことを確認すること。
- ・破損や過剰な発熱の原因となるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・回転数 10,000 rpm を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、破損、磨耗、腐食(錆)、変形、孔の発生、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- ・使用前に洗浄、滅菌(高圧蒸気滅菌)すること。137°C以上に加熱しないこと。
- ・高圧蒸気滅菌のセット又は包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・作業時には、目の損傷、飛沫感染を防ぐために保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・購入時の容器に入れたまま、高温、低温、多湿、直射日光、水分(水濡れ)、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する際は、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をすること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者 : フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者 : ストダード マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド
(Stoddard Manufacturing Company Limited) (英国)