

レーズブラシ

【形状・構造及び原理等】

ブラシ形状：コンバージング 又は ストレート

ブラシ列数：1、2、3 又は 4

材質：＜中心軸＞ポリエチレン、木、黄銅 又は アルミニウム

＜ブラシ＞毛（ブタ、ウマ又はヤギ） 又は 毛と綿の混合

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ストダード マニュファクチュアリング
カンパニー リミテッド
(Stoddard Manufacturing Company Limited) (英国)

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズに装着し、回転させて使用する。
推奨回転速度：1,400－5,000 rpm

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品が併用される歯科技工用電気レーズは、以下の内容に適合する機器に限定する。
 - ・本品を確実に把持することが可能である。
 - ・使用中、規定する最大回転数以内に制御が可能である。
- ・接続する機器の取扱説明書等に従って確実に装着し、固定されていることを確認すること。
- ・使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- ・破損の原因となるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・回転数 5,000 rpm を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず点検し、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
- ・研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を着用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・購入時の容器に入れたまま、ほこり、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に必ず点検し、破損、磨耗、腐食、変形、脱落その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。