

オクルーザルブラシ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・購入時の容器に入れたまま、ほこり、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効期間の管理をすること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【形状・構造及び原理等】

形状：



軸の種類：ISO 1797-1 タイプ 1 （RA タイプ）

材質：（ブラシ）炭化ケイ素、ポリメタフェニレンイソフタルアミド
（軸）黄銅、ニッケルめっき
ゴールドタイプは軸に金めっきが施されている。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

- ・使用前に滅菌する。（高圧蒸気滅菌／各医療機関により検証され確認された滅菌条件による。例 134－137℃ 3 分以上）
- ・歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品を接続する歯科用ハンドピース（コントラアングル）は、以下の内容に適合する機器に限定する。
 - ・本品のシャンク（軸）を確実に把持することが可能である。
 - ・使用中、規定する回転数での制御が可能である。
- ・接続する機器の取扱説明書等に従ってシャンク（軸）を確実に奥まで挿入して、緩みがないことを確認すること。
- ・予め患者の口腔外で回転させ、振れがないことを確認すること。
- ・破損や過剰な発熱の原因となるため、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ・回転数 5,000 rpm を超えて使用しないこと。
- ・本品はブラシに研磨成分を含むため、歯面研磨材との併用は不要である。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をし、破損、摩耗、腐食（錆）、変形、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・使用前に洗浄、滅菌（高圧蒸気滅菌）をすること。
- ・高圧蒸気滅菌のセット又は包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・研磨作業時には、目の損傷、飛沫感染を防ぐために、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱うこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外の使用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ストダード マニュファクチャリング
カンパニー リミテッド
(Stoddard Manufacturing Company Limited) (英国)