

オールガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 「使用方法」
- ・再使用禁止
 - ・体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿 100%の折りたたまれたガーゼである。

折りたたみサイズ(mm)	ply（積層枚数）
約 51× 51	12 または 8
約 76× 76	12
約 102×102	12 または 8

アメリカ薬局方「Absorbent Gauze」（Type VII）に準拠する。

条数（本）：縦糸 18-22/2.54cm 横糸 8-14/2.54cm
6.45 cm²の条数 27-35

重量（g/m²）：18.1-23.1

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とするガーゼから成る器具である。

【使用方法等】

適宜滅菌して使用する。

【使用上の注意】

- ・包装に開封、破損、汚損等が見られる場合は使用しないこと。
- ・滅菌する場合は、製品の包装から出して高圧蒸気滅菌をすること。
- ・滅菌のセット及び包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する場合、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：フォメド インダストリーズ インク
(中華人民共和国)
(Fomed Industries Inc.)