

歯 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ソフトブラシ

【形状・構造及び原理等】

形状：作業部径が 55mm と 80mm の 2 タイプ
材質：軸；プラスチック
作業部；豚毛で不織布を挟んだ 3 層構造

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズに装着し、回転させて使用する。
推奨回転数：

作業部径（mm）	推奨回転数（rpm）
55	2800
80	1400

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ 装着する機器の取扱説明書等に従って確実に取り付けし、固定されていることを確認すること。
- ・ 使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- ・ 下記の最大回転数を超えて使用しないこと。

作業部径（mm）	最大回転数（rpm）
55	3200
80	2800

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず製品の点検（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・ 研磨作業時には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を着用すること。
- ・ 研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を着用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・ 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・ 長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので適宜交換すること。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用はしないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ ほこり、水分（水漏れ）を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 使用前に必ず点検し、消耗状態等を見極め、定期的に交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 * **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ローデント エーゲー（スイス）
（Rodent AG）