

器 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 70682000


カートリッジガン

【形状・構造及び原理等】

材質：プラスチック

形状：

50mL 用

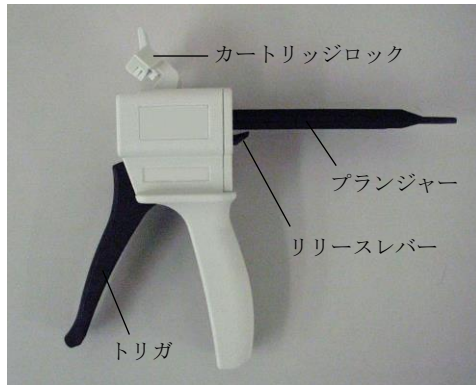

10mL 用




【使用目的又は効果】

歯科材料を練和又は混和し、注入するために用いる器具である。


【使用方法等】

本品はカートリッジタイプの歯科材料及びミキシングチップ（ともに別売）を接続して使用する。

1. リリースレバーを押し上げたまま、プランジャーを手前方向へ止まるまで引く。

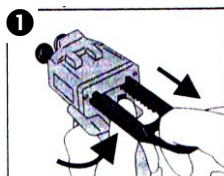


2. 50mL 用：カートリッジロックを引き上げ、カートリッジ底部の V 字溝を南向きにカートリッジを取り付ける。
10mL 用：カートリッジ底部の U 字溝を上向きにカートリッジを横にスライドさせて取り付ける。

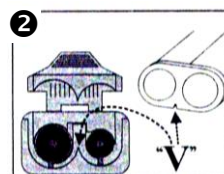

3. カートリッジロックを押し下げ、カートリッジを固定する（50mL 用のみ）。プランジャー後端部を手で押し込むか、トリガを必要回数操作して、プランジャーがカートリッジ底部に突き当たるまで前進させる。

4. カートリッジのキャップを取り外し、トリガを握って歯科材料を少量押し出す。カートリッジの 2 つの注出口から均等かつスムーズにペーストが出ることを確認し、詰まり等がある場合は、エクスプローラ等で取り除く。

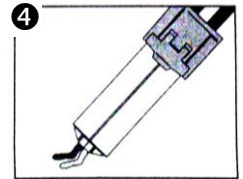

5. ミキシングチップをカートリッジに確実に装着する。
6. 歯科材料はミキシングチップ内部の攪拌翼により練和されるので、適当な均一な力でトリガを握り、目的の部位へ練和物を注入する。
7. カートリッジを交換する場合は、リリースレバーを押し上げてプランジャーを手前方向へ止まるまで引き、50mL 用はカートリッジロックを引き上げて、10mL 用は横にスライドさせてカートリッジを取り外す。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・練和時には、カートリッジとミキシングチップが確実に装着されていることを確認してから、トリガを握って歯科材料を押し出すこと。
- ・本品の操作時に過大な力を加えないこと。カートリッジガンを壊したり、カートリッジを破壊させたり、カートリッジの後部から歯科材料が漏れたりすることがある。
- ・カートリッジに関する取扱い方法等については、接続する歯科材料の添付文書を確認し、その記載に従うこと。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず点検し、破損、磨耗、腐食（錆）、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する際、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・必要に応じ、アルコール清拭による消毒、または高圧蒸気滅菌を行うこと。（各医療機関によって検証され確認された滅菌条件による。）
- ・本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）134℃を超えて加熱しないこと。
- ・滅菌時のセットまたは包装は、関連器材の使用を熟知して行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：シュルツァー ミックスパック エーゲー (スイス)
(Sulzer Mixpac AG)