

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

ヒートレスホイール

【形状・構造及び原理等】

形状：

ヒートレスホイール

ホワイトヒートレスホイール



材質：ヒートレスホイール；炭化けい素
ホワイトヒートレスホイール；酸化アルミニウム
寸法：径；19.1mm、22.2mm、25.4mm
厚さ；2.4mm、3.1mm、4.8mm

【使用目的又は効果】

炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材である。

【使用方法等】

別売りのマンドレルに本品を取り付け、歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・ マンドレルに確実に接続し、緩みがないことを確認すること。
- ・ 使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- ・ 20,000rpm を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず製品及び包装の点検をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・ 研削又は研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
- ・ 研削又は研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を着用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・ 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・ 長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水分（水濡れ）を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に必ず点検し、本品に破損、変形、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：キーストーン インダストリーズ（アメリカ合衆国）
（Keystone Industries）