

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

レーズブラシ ウッドハブ

【形状・構造及び原理等】



コンバージ型

アップライト型

材質：ブラシ；豚毛
中心軸；ウッドタイプ

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：キーストーン インダストリーズ（アメリカ合衆国）
(Keystone Industries)

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズに取り付け、回転させて使用する。
推奨回転数：1,750rpm

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・接続する機器の取扱説明書等に従って確実に取り付けし、固定されていることを確認すること。
- ・使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- ・3,600rpm を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・研削又は研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
- ・研削又は研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を着用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分（水濡れ）を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に必ず点検し、本品に破損、磨耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。