

## コットンロール（未滅菌）


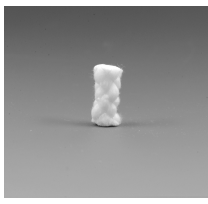

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

綿繊維のロール状の塊である。

①コットンロール	②ピドロール	③デンタルラップロール
		
φ 8×38、 φ 8×150、 φ 10×38、 φ 10×100、 φ 10×150	φ 8×19、 φ 10×19	φ 10×38

（単位：mm）

### 【使用目的又は効果】

口腔内で唾液または血液等の除去のために用いる。

### 【使用方法等】

口腔内に適用し、唾液または血液等を除去する。

### 【使用上の注意】

- ・本品は未滅菌品であるため、使用に際しては、滅菌した上で使用すること。
- ・包装に開封、破損、汚損等が見られる場合は使用しないこと。
- ・開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ・デンタルラップロールを高圧蒸気滅菌する場合、132℃（12分間）を超えないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する場合、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：シオン バイオテキスト メキシコ  
エスユービーアイ デ シーブイ（メキシコ）  
（SION BIOTEXT MEXICO S. A. P. I. DE C. V.）