

歯 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

エリートダブル8

【形状・構造及び原理等】**

形状（主成分）：液体（ポリビニルシロキサン、二酸化ケイ素）

操作時間（23℃）：300～480（秒）

硬さ（1時間後）：6～11（Shore A）

「有効期間」

- ・本品の使用期限は、24ヶ月である。
- ・外装に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]
（例示：2008 - 03 は、使用期限 2008年3月を示す。）

【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型等の作製に用いる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

【使用方法等】

1. 印象をとる模型が汚れていないことをよく確認する。場合によっては一層削って油分が一切残らないようにすること。模型が完全に乾いていることを確認し、適当なサイズのフラスコを選び、フラスコ内に模型をワックスで固定させる。
2. 使用前にそれぞれのボトルをよく振り、キャタリストとベースを同量ずつ量り、色が均一になるまで約1分間混ぜ合わせる。容器の底や側面に未混合物が残らないように気をつけること。
3. フラスコ上約30cmの高さからゆっくりと本品を注ぐ。混和開始を起点とする操作時間は4～6分（23℃下）である。真空にする必要はない。途中で注入量が不足した場合にはシリコンが完全に固まるのを待ち、それまでと同じ方法で不足分を追加注入する。
4. 重合時間は約20分である。混和開始から30分後、模型分離が可能になる。模型と複模型の分離には圧縮空気のジェット噴射を使用すること。型が変形してしまうため、ナイフなどの道具を使って機械的力を加えたり、フラスコから引き出したりしないこと。

製造業者：ゼルマック エスピーエー（イタリア）
（ZHERMACK S.p.A）

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・正しい操作タイミングをとり、仕上がり時の特性が変わらないようにするため、1:1の混合比をきちんと守ること。
- ・ダイスペーサー、レジンなどは本品の重合反応を阻害する可能性があるため、これらが完全に安定化するまで本品の使用を待つこと。
- ・本品との接触表面は清浄で乾燥していることを十分確認すること。
- ・使用後は蓋を間違えず、しっかり閉めること。

【使用上の注意】

- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品に対して発疹・皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こした場合には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- ・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに多量の水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受ける等適切な処置を施すこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・直射日光を避け、5～27℃の場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。