

歯 06 歯科用印象材料  
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

## プラティナム75 CAD

### 【禁忌・禁止】

本品使用時には、ラテックス製手袋を使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状（主成分）：

ペースト状（ポリビニルシロキサン、二酸化ケイ素）

操作時間（23℃）：60～100（秒）

硬さ（8分後）：70～80（Shore A）

硬さ（1時間後）：72～82（Shore A）

### 【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型等の作製に用いる。

### 【使用方法等】

1. ベース、キャタリストそれぞれ専用の計量スプーンを用いて 1:1 の割合になるよう正確に必要な量を取り出す。
2. 2色の色が均一になるまで約30秒間、指でよく練る。
3. 練和した印象材を石膏に盛り付ける。
4. 約4分で硬化するので、硬化後印象材を石膏から取り外す。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- ・本品の硬化の妨げとなることがあるため、ラテックス製手袋を装着したまま、もしくは装着した手との接触を避けること。
- ・ビニル製手袋を使用すること。
- ・標準重合時間を得るためには、ベースとキャタリストを正確に同量にすること。
- ・キャタリストを多めに練和しても重合時間は短縮されない。
- ・使用後は容器の周りを拭取り蓋をしっかりと閉めること。

### 【使用上の注意】

「使用注意」

- ・本品は衣服に付着させると除去できないため付着させないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

「重要な基本的注意」

- ・皮膚との長時間の接触、または反復接触を避けること。
- ・本材又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で10分以上洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温、湿気、水分（水濡れ）を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に5～27℃内で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・本品の使用期限は、24ヶ月である。
- ・外装に記載の使用期限までに使用すること。  
[記載の使用期限は自己認証（製造業者データ）による]  
（例示：☞2013 - 03 は、使用期限2013年3月を示す。）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\* \*\*

製造販売業者：フィード株式会社

商品インフォメーションデスク

電話 0120-004-504

製造業者：ゼルマック エスピーエー（イタリア）  
（ZHERMACK S.p.A）