

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

スキんフィット ニトリルグローブ P F

再使用禁止

【禁忌・禁止】

「使用方法」
・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】* **

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：スリ トラング グローブ (タイランド)
パブリックカンパニー リミテッド (タイ)
(Sri Trang Gloves (Thailand) Public
Company Limited)

スリ トラング グローブ (タイランド)
パブリックカンパニー リミテッド
スラタニ ブランチ (タイ)
(Sri Trang Gloves (Thailand) Public
Company Limited, Suratthani branch)

スリ トラング グローブ (タイランド)
パブリックカンパニー リミテッド
アンバー ブランチ (タイ)
(Sri Trang Gloves (Thailand) Public
Company Limited (Anvar Branch))

【形状・構造及び原理等】

形状：左右兼用タイプ
サイズ：SS, S, M, L
材質：ニトリルゴム、パウダーフリー

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。

【使用方法等】

取出口より手袋を取り出し、着用する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・手袋は衛生的に装着すること。また、装着する際に乱暴に扱うと破れたり穴があく可能性があるため注意すること。
- ・使用中に脱落するおそれがあるため、大きすぎるサイズの製品は使用しないこと。

【使用上の注意】

- ・体質等によりかゆみ、かぶれ等の刺激性皮膚炎、またはアレルギー性症状(Ⅳ型-遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による)をまれに起こす可能性がある。このような症状を起こした場合には、使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・使用前に必ず製品及び包装の点検をし、汚れ、破損(特にピンホール)、その他損傷等が確認された場合使用しないこと。
- ・刃物等の鋭利な器具に触れると、破れたり穴があく可能性があるため注意すること。
- ・本品は熱に弱いので熱いものに接触させないこと。
- ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり浸透したりする場合があるため、確認してから使用すること。
- ・使用中に破けた場合、または非衛生的な部位と接触した場合、即時新しい製品に交換すること。
- ・本品は手術用手袋ではないため、手術には使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温(30℃以上)、低温、多湿、水分(水濡れ)、直射日光、紫外線、オゾンを避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。