

歯 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用パラフィンワックス 70893000

F E E Dパラフィンワックス

【形状・構造及び原理等】

サイズ：74×146×1.4mm（縦×横×厚さ）

材質：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
ミツロウ、カルナバワックス、色素等

【使用目的又は効果】

主として義歯床の仮床、人工歯の排列等に用いるワックスである。

【使用方法等】

- ・ 板状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところでロール状に巻いて棒状に形成する。
- ・ 棒状のワックスを馬蹄型に成形後、基礎床に圧接する。
- ・ ワックスの過不足は、盛り足したり削ることにより補い、咬合床を完成する。
- ・ 咬合床の調整、人工歯の排列、蟻義歯の作製は、通法に従う。

【使用上の注意】

- ・ 本材を使用する際は、火傷しないよう注意すること。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温、直射日光、火気を避けて保管すること。
- ・ 使用場所および保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材は一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：アソシエイテッド デンタル プロダクツ
リミテッド（英国）
（Associated Dental Products Limited）