

F E E D ミ リ ン グ バ ー

【形状・構造及び原理等】

材質：ステンレス鋼、ダイヤモンドコート（作業部のみ）

【使用目的又は効果】

補綴物等の研削に用いる器材である。

【使用方法等】

併用する医療機器

・歯科技工用 CAD/CAM 装置

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「セレック MC XL プレミアム」

医療機器届出番号：13B1X10236S10003

製造販売元：デンツブライシロナ株式会社

歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

「インラボ MC XL」

医療機器届出番号：13B1X10236S10004

製造販売元：デンツブライシロナ株式会社

・研削する材料

上の歯科技工用 CAD/CAM 装置が指定する材料

使用方法

詳細な使用方法については、歯科技工用 CAD/CAM 装置に付属の添付文書及び取扱説明書等を参照してください。

1. 歯科技工用 CAD/CAM 装置の添付文書及び取扱説明書にしたがい、本ミリングバーを歯科技工用 CAD/CAM 装置に取り付ける。
2. 予備回転を行い、ブレやガタツキ等の異常がないことを確認してから加工を行う。
3. 歯科技工用 CAD/CAM 装置の操作を行い、研削を行う。

【使用上の注意】

- ・本品は、専用品のため、【使用方法等】の項に記載の医療機器以外とは併用しないこと。
- ・使用前に必ず製品の点検（【保守・点検に係る事項】参照）をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り扱うこと。
- ・長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科用 CAD/CAM 装置及びその材料に関して、十分な知識及び技能を有する歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、水分（水濡れ）、オゾン、腐食性薬剤及びその上記の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・接触腐食を防ぐため、材質の異なる金属製器具どうしは保管時に接触させないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に必ず点検し、本品に破損、磨耗、腐食（錆）、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・本品は使用前及び使用後の洗浄・滅菌は行わないこと。
- ・切削カスが本品に付着した場合は、柔らかいブラシなどを用いて取り除くこと。
- ・歯科技工用 CAD/CAM 装置から外して保管をする際は、完全に乾燥していることを確認し、付属のケースに入れて保管すること。（【保管方法及び有効期間等】参照）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社

商品インフォメーションデスク

電話 0120-004-504

製造業者：ストラウス インダストリアル ダイヤモンズ
リミテッド（イスラエル）
（Strauss & Co. Industrial Diamonds Ltd.）