

歯 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストリングワックス 16189000

## FEEDインレーワックス

---

### 【形状・構造及び原理等】

形状：缶入り 45g

主成分：パラフィンワックス、カルナバワックス  
EVA樹脂、色素

### 【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストリングワックスである。

### 【使用方法等】

1. 石膏模型に分離材を塗布した後、適温に熔融したワックスを少量ずつ流し、築盛する。
2. ワックスが完全に冷えた後、不要部分を削り、形状を整える。

### 【使用上の注意】

- ・ 加熱の際に発生する蒸気を吸入しないよう、使用時はマスク等保護具を着用すること。使用場所および保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材を使用する際は、火傷しないよう注意すること。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・ 高温、直射日光、火気を避けて室温保管すること。
- ・ 使用場所および保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材は一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504

製造業者：アソシエテッド デンタル プロダクツ  
リミテッド（英国）  
（Associated Dental Products Limited）