

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

カッティングディスク

【形状・構造及び原理等】

形状：円形

材質：

酸化アルミニウム、フェノール樹脂、樹脂ゴム、炭化けい素
（セラミック用は炭化けい素を含む）

寸法：

タイプ	直径 (mm)	厚さ (mm)	用途
#1	38	0.7	金属用
#2	22	0.25	セラミック用
#3	25	0.3	セラミック用

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント
カンパニー リミテッド
（中華人民共和国）
（Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd）

【使用目的又は効果】

炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材である。

【使用方法等】

別売りのマンドレルに本品を取付け、歯科用ハンドピースに装着し
回転させて、ソフトタッチで断続的に被研削物に押し付けて研削す
る。

推奨回転数： 10,000～12,000rpm

「使用方法等に関連する使用上の注意」

- ・ マンドレルに確実に接続し、緩みがないことを確認すること。
- ・ 使用前に予備回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- ・ 使用前に必ず製品及び包装の点検をし、異常が確認された場合
使用しないこと。
- ・ 研削作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用す
ること。
- ・ 研削作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マス
ク等を使用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・ 折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打
刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・ 破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に取り
扱うこと。
- ・ 長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換するこ
と。
- ・ 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこ
と。
- ・ 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温、低温、多湿、乾燥、水分（水濡れ）を避けて、外圧（物
理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 使用前に必ず点検し、本品に破損、変形、その他損傷等が確認
された場合、使用を中止し廃棄すること。