

機械器具 67 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダムフレーム 31849000

ラバーダムフレーム

【形状・構造及び原理等】

形状：



材質：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

術野に到達しやすくするためにラバーダムを延伸した状態で保持する柔軟なフレームである。

【使用方法等】

1. ラバーダムフレームの向きを合わせる。
2. ラバーダムフレーム中央を正中に合わせる
3. 上顎側を基点とし対角線上に歯科用ラバーダムを引きフレームの小突起に掛ける。
4. 張り具合を調整する。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検、洗浄をし、異常が確認された場合使用しないこと。
- ・折損、破損等の原因となるので、本品に対する曲げ・切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・商品の外周に鋭い箇所がある為、誤って怪我をしないよう充分注意すること。
- ・長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に必ず点検し、本品にバリ、破損、変形、その他損傷等が確認された場合、使用を中止し廃棄すること。
- ・使用前に、消毒用アルコールで清拭すること。
- ・洗浄または消毒する際は、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・機器に付着した血液、体液、組織及び薬品、歯科材料等は、乾燥・

固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ・洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）で洗浄する際、器具どうしが接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎを行うこと。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
- ・高圧蒸気滅菌はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント
カンパニー リミテッド
（中華人民共和国）
（Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd）