

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療用脱脂綿 70975000

F E E D カット綿 K G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

綿 100%の脱脂綿
サイズ：4cm×4cm

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料である。

【使用方法等】

適宜滅菌して使用する。

【使用上の注意】

- ・包装に開封、破損、汚損等が見られる場合は使用しないこと。
- ・滅菌する場合、製品の包装から出して、EOG 滅菌又は高压蒸気滅菌をすること。
- ・滅菌のセットまたは包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光および火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する場合、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ヒューベイ チェンジン キンファ メディカル
マテリアル
(中華人民共和国)
(HUBEI QIANJIANG KINGPHAR MEDICAL MATERIAL
CO., LTD)