

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 70891000

F E E D 技 工 用 シ リ コ ー ン

【形状・構造及び原理等】

	形状	主成分
ベース	ペースト	ポリジメチルシロキサン、二酸化ケイ素
キャタリスト	ジェル	流動パラフィン、アルキルシランスズ化合物 (ベース、キャタリストは別売)

タイプ	硬度 80	硬度 90
練和時間	30 秒	
操作時間	90 秒	
硬化時間	8 分	
ショアA硬さ（24 時間）	78～82	88～92

【使用目的又は効果】

シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型等の作製に用いる。

【使用方法等】

- 付属の計量スプーンでベースを必要量計り、手のひらに広げる。広げたベースに計量スプーンの縁を押し当てて型をとる。
- 型の端から端までの長さ（4cm）に FEED 技工用シリコーンキャタリストを棒状に 2 本押し出す。（ベース、スプーン 1 杯に対してキャタリストは 8cm の割合。）
（混合比としてはベース 100g に対して、キャタリスト 3g である）
- キャタリストをベースに畳み込むように混ぜ合わせ、色が均一になるまで 30 秒間、指でよく練る。
- 練和されたペーストを目的に合わせて使用する。

「使用方法に関連する使用上の注意」

- ・本品の硬化の妨げとなることがあるため、ラテックス製手袋を装着したまま、もしくは装着した手との接触を避けること。
- ・ビニル製手袋を使用すること。
- ・キャタリストは、押し出すときに透明な液体が出ることがあるため、使用前に紙パッドに少し押し出し、透明な液体が出た場合にはその部分を捨て、ジェル状のキャタリストが出る事を確認してから使用すること。
- ・硬化時間に影響を与えるため、付属の計量スプーンを使用すること。
- ・温度が高い場合は硬化時間が早くなり、温度が低い場合は硬化時間が遅くなるので注意すること。
- ・使用後は容器の周りを拭取り蓋をしっかりと閉めること。

【使用上の注意】

「使用注意」

- ・本品は衣服に付着させると除去できないため、付着させないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

「重要な基本的注意」

- ・本品に対して発疹、皮膚炎など過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは使用を中止し、医師に相談する等適切な処置を施すこと。
- ・皮膚との長時間の接触、または反復接触を避けること。

- ・本品又は練和物は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の水で 10 分以上洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温、湿気、水分（水濡れ）を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に 30℃以下（キャタリスト 5～27℃）で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

「有効期間」

- ・有効期間：ベース：36 ヶ月
キャタリスト：28 ヶ月
[自己認証（製造業者データによる）]
（外装表示の例示：📅20-04 は、有効期限 2020 年 4 月を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ファマデント エスエルユー（スペイン）
（Famadent, S. L. U.）