

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

RENFERT GEO クローワックス

【形状・構造及び原理等】

主成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
色素

種類：

種類	硬さ	溶解範囲
トランスペアレント	ミディアムハード	66℃～ 76℃
オペーク		
サービカル・アンダーカット トランスペアレント	ソフトミディアム ハード	57℃～ 68℃

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

1. 模型材の表面にワックス分離材を塗布する。
2. ワックス インストルメントなどを用いて、少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛上げていく。
3. カービング・埋没は通法に従い作業する。

【使用上の注意】

- ・加熱の際に発生する蒸気を吸入しないよう、使用時はマスク等保護具を着用すること。
- ・使用場所には、消火装置を備えること。
- ・本材を使用する際は、火傷しないよう注意すること。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・高温、直射日光、火気を避けて室温保管すること。
- ・使用場所および保管場所には、消火装置を備えること。
- ・本材は一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：レンフェルト ゲーエムベーハー（ドイツ）
(Renfert GmbH)