

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## RENFERT 研磨ペースト

### 【形状・構造及び原理等】

製造業者：レンフェルト ゲーエムベーハー（ドイツ）  
(Renfert GmbH)

形状：

- ・サファイア



- ・ユニバーサルポリッシングペースト



主成分：酸化クロム、シリカ、アルミナ質研削材

- ・サファイア：プレシヤスメタル 仕上げ用
- ・ユニバーサルポリッシングペースト：レジン床 仕上げ用

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

### 【使用方法等】

1. ブラシ、バフ、フェルトホイール等に本品を付ける。
2. 本品をつけたブラシ、バフ、フェルトホイール等を歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転装置に装備し回転させ断続的に押し付けて研磨する。

### 【使用上の注意】

- ・研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
- ・研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光、火気、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社  
商品インフォメーションデスク  
電話 0120-004-504