

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

RENFERT ポリッシュ

【形状・構造及び原理等】*

形状：



主成分：酸化アルミニウム、ダイヤモンド、脂肪酸、染料、
パラフィン（ハイブリッドのみ）

種類：

種類	適合
オールインワン	ジルコニア、ニケイ酸リチウム、 ハイブリッドセラミック、 高性能ポリマー
ジルコニア	ジルコニア
プレスセラミックス	ニケイ酸リチウム
ハイブリッド	ハイブリッドセラミック

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

本品をブラシ、パフ、フェルトホイール等に付け、ハンドピースに
装着し、回転させ断続的に被切削物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

- ・研磨作業時には、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。
- ・研磨作業時には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないよう努めること。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光、火気を避けて、汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：レンフェルト ゲーエムベーハー（ドイツ）
（Renfert GmbH）