

C o r e M E D 不織布ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 「使用方法」
- ・再使用禁止
 - ・体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

レーヨン 60%、ポリエステル 40%の折りたたまれた不織布である。

折りたたみサイズ(mm)	折
約 50×50	4
約 75×75	4
約 100×100	4
約 125×125	4

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材である。

【使用方法等】

適宜滅菌して使用する。

【使用上の注意】

- ・包装に開封、破損、汚損等が見られる場合は使用しないこと。
- ・滅菌する場合、製品の包装から出して高圧蒸気滅菌、または EOG 滅菌をすること。
- ・滅菌のセット又は包装は、関連器材の仕様を熟知して行うこと。
- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

「保管方法」

- ・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済みのものを貯蔵・保管する場合、汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ジウジャン ファダ メディカル ドレッシング
カンパニー リミテッド
(中華人民共和国)
(Jiujiang Huada Medical Dressing Co.,Ltd)