

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000

フリップアップルーペ

【禁忌・禁止】

「使用方法」


- ・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、レーザーなどの強い光を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】* **

スタンダードタイプ



ゴーグルタイプ

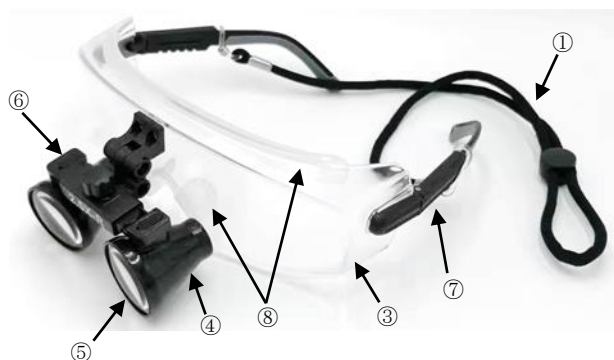

構成：

- | | |
|-----------|--------------|
| ①ヘッドストラップ | ⑥ピン調整・取付ユニット |
| ②眼鏡フレーム | ⑦眼鏡アーム |
| ③眼鏡レンズ | ⑧クッション |
| ④ルーペフレーム | ⑨ドライバー（付属品） |
| ⑤ルーペレンズ | ⑩レンズクロス（付属品） |

材質：

ヘッドストラップ：布
眼鏡フレーム：ポリカーボネート
眼鏡レンズ：ポリカーボネート

ルーペフレーム：ポリカーボネート+ABS
ルーペレンズ：K9 ガラス
ピン調整・取付ユニット：ABS
眼鏡アーム：ナイロン（アームの下部：ゴム）
クッション：シリコン

【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから成るシステムである。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。

【使用方法等】**

1. スタンダードタイプは眼鏡フレームに、ゴーグルタイプは眼鏡アームにヘッドストラップを装着する。
2. 本品を装着し、ヘッドストラップを締めて頭部に固定する。
3. 眼鏡レンズに触れるよう、ルーペレンズを押し下げる。
4. 瞳孔間距離調節ネジを回してルーペレンズを瞳孔位置に合わせる。
5. 焦点を調整し、作業距離を確認する。

【使用上の注意】**

- ・明るい場所で使用すること。
- ・ヘッドストラップで確実に頭部に固定し、緩みのない状態で使用すること。
- ・本品の掛け外しは、必ず両手で眼鏡フレームや眼鏡アームを持つて行うこと。
- ・影のない丸い像が得られるように位置を調節すること。



- ・ルーペレンズを顔面から 30° ～45° 下に傾けて使用すること。
- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、摩耗、変形、脱落、その他異常が確認された場合は使用しないこと。
- ・ネジに固さや緩みがある場合、付属のドライバーで調節すること。過度に固い状態で焦点や高さを調整すると、破損の原因となる。
- ・分解、改造等をしないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・医療従事者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、高温、多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて保管すること。
- ・使用しない場合は、専用のケースにて保管すること。

【保守・点検に係る事項】**

- ・ルーペレンズおよび眼鏡レンズの清拭は、付属のレンズクロスを使用すること。
- ・眼鏡フレームや眼鏡アームの消毒は、消毒用アルコールを含ませた布で拭くこと。ただし、ルーペレンズおよび眼鏡レンズはアルコールで不具合が生じる恐れがあるため触れないよう注意すること。

- ・ルーペレンズ内部の曇りの原因となるため、ルーペレンズの水洗いや液体の直接噴霧は行わないこと。
- ・ゴーグルタイプは、曇り止めの効果が薄れる恐れがあるため、過度な力で拭かないこと。
- ・高圧蒸気滅菌、薬液滅菌、ガス滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者 : ハンゾウ シーイー メディカル インスツルメント
カンパニー リミテッド
(中華人民共和国)
(Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd)