

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000



アジャスタブルルーペ

【禁忌・禁止】

「使用方法」

- ・使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、レーザーなどの強い光を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

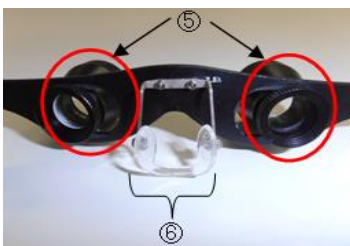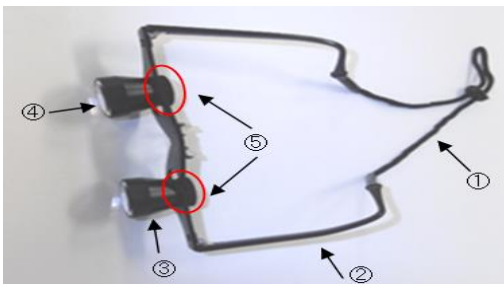

構成：

- ①ヘッドストラップ
 - ②レンズフレーム
 - ③ルーペフレーム
 - ④ルーペレンズ
 - ⑤瞳孔間距離調整ネジ
 - ⑥鼻当て
- ・レンズクロス (付属品)
 - ・レンズキャップ (付属品)
 - ・専用ケース (付属品)

倍率	2.5x
作業距離(mm)	300~330
視野径(mm)	70

材質：

- ヘッドストラップ：化学繊維
- レンズフレーム：ABS
- ルーペフレーム：アルミニウム
- ルーペレンズ：ガラス
- 瞳孔間距離調整ネジ：鉄
- 鼻当て：シリコン

【使用目的又は効果】

外科処置時に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから成るシステムである。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。

【使用方法等】

1. レンズフレームにヘッドストラップを装着する。
2. 鼻当てが鼻にフィットするように当て部分をつまむ、又は広げる。
3. 本品を装着し、ヘッドストラップを締めて頭部に固定する。
4. 瞳孔間距離調整ネジを回してルーペフレームを瞳孔位置に合わせる。

5. 瞳孔間距離調整ネジにゆるみがなくレンズが固定されているか確認する。
6. 焦点を調整し、作業距離を確認する。

【使用上の注意】

- ・事前に本器を使用した立体視に充分慣れた上で使用すること。
- ・同じ姿勢で長時間使用を続けると、眼精疲労、頭痛、頸部痛等を発症することがあるので注意すること。
- ・瞳孔間距離の調整を適切に行わないまま使用を続けると頭痛等の症状を発症することがあるので注意すること。
- ・眼鏡レンズレスタイプであることを鑑み、飛沫感染防止用のシールド等を着用すること。
- ・明るい場所で使用すること。
- ・ヘッドストラップで確実に頭部に固定し、緩みのない状態で使用すること。
- ・レンズが固定され、動かないことを確認してから使用すること。
- ・本品の掛け外しは必ず両手でレンズフレームを持って行うこと。
- ・影のない丸い像が得られるように位置を調節すること。



- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、摩耗、変形、脱落、その他異常が確認された場合は使用しないこと。
- ・分解、改造等をしないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・医療従事者以外には使用しないこと。
- ・廃棄の際は、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光、高温、多湿、水分（水濡れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて保管すること。
- ・使用しない場合は、専用のケースにて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ルーペレンズの清拭は、付属のレンズクロスを使用すること。
- ・レンズフレームの消毒は、消毒用アルコールを含ませた布で拭くこと。ただし、ルーペレンズはアルコールで不具合が生じる恐れがあるため触れないよう注意すること。
- ・ルーペレンズ内部の曇りの原因となるため、ルーペレンズの水洗いや液体の直接噴霧は行わないこと。
- ・高圧蒸気滅菌、薬液滅菌、ガス滅菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：フィード株式会社
商品インフォメーションデスク
電話 0120-004-504

製造業者：ハンゾウ シーイー メディカル インストルメント
カンパニー リミテッド
(Hangzhou Siyi Medical Instrument Co., Ltd)
(中華人民共和国)